

## PAKKAUSSELOSTE

### A-VITA® HYDRA+

#### Nenäsuihke,

joka sisältää ristikkäissidottua hyaluronihappoa, dekspantenolia, biotiinia sekä A- ja E-vitamiinia.

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat valmisteen käytön.**

#### 1. Mitä A-Vita® Hydra+ on ja mihin sitä käytetään

A-Vita® Hydra+ nenäsuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite, joka voitelee ja kosteuttaa nenän limakalvot sekä pitää ne joustavina. Lisäksi valmiste edistää limakalvoepiteelin (pintakerroksen) uusiutumista.

Ristikkäissidottu hyaluronihappo (0,1 %) ja dekspantenoli (1 %) kosteuttavat ja lisäävät nenän limakalvojen viskoelastisuutta (eli joustavuutta). Biotiini, A- ja E-vitamiini edesauttavat limakalvojen normaalia aineenvaihduntaa.

#### **A-Vita® Hydra+ nenäsuihke on tarkoitettu:**

- käytettäväksi etenkin ympäristöolosuhteiden tai eri hoitotoimenpiteiden (pöly, ärsyttävät aineet, nenää avaavat sumutteet, happihoito jne.) aiheuttaman kuivan ja/tai atrofisen nenän limakalvojen kuivuuteen ja/tai surkastumiseen.
- nenän ja sivuonteloiden sairauksien tukihoidon (rinosinuiitti, allerginen nuha, lääkenuha, krooninen atrofinen nuha yms.)
- käytettäväksi nenän ja sivuonteloiden leikkausten jälkihoitona, normaalin limakalvotoiminnan palautumisen edistämiseksi.

#### 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät A-Vita® Hydra+ nenäsuihketta

Älä käytä tätä valmistetta, jos olet yliherkkä jollekin sen sisältämistä aineista (lueteltu kohdassa 6).

#### 3. Miten A-Vita® Hydra+ nenäsuihketta käytetään

- Poista sinetöity suojakorkki. Aseta peukalosi pullon pohjaan ja etusormesi sekä keskisormesi sumuttimen siivekkeille. Paina siivekkeitä napakasti alaspäin, ja päästä sitten siivekkeistä irti. Toista kunnes ensimmäinen suihkeannos vapautuu pullosta. Kallista sitten päätäsi hieman eteenpäin ja hengitä hitaasti ulos. Sulje toinen sieraimesi sormella ja suihkauta sisäänhengityksen aikana yksi annos avoimeen sieraimeseen.
- Suositeltu annos on kaksi suihkausta sierainta kohti kahdesti päivässä, tai lääkärin ohjeen mukaan.

#### 4. Varoitukset

- Jos haittavaikutuksia ilmenee, keskeytä tuotteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin.
- Älä niele tuotetta.
- Vältä tuotteen joutumista silmiin.
- Älä käytä tuotetta, mikäli pakkaus tai pullo eivät ole ehjiä.
- Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä koskee ehjää ja oikealla tavalla säilytettyä valmistetta.

#### 5. A-Vita® Hydra+ nenäsuihkeen säilyttäminen

- Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
- Sulje pullo huolellisesti käytön jälkeen.
- Säilytä nenäsuihke huoneenlämmössä.

#### 6. Muut tiedot

##### **Koostumus:**

Dekspantenoli, E-vitamiiniasetaatti, A-vitamiinipalmitaatti, biotiini, hydrogenoitu risiiniöljy 40 haihtuva öljy, ristikkäissidottu hyaluronihappo, etyleenidiamiinitetraetikkahapon (EDTA)

natriumsuola, natrium-N-(hydroksimetyyli)-glysinaatti, kaliumsorbaatti, luontaiset makuaineet, isotoninen puskuriliuos pH 7,2.

**Pakkaus:**

20 ml pullo.

**Valmistaja:**

D.M.G. Italia srl, Via Laurentina, km 26,700, 00040 Pomezia (RM), Italia

**Markkinoija:**

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki

A-Vita® Hydra+ nenäsuihke on Neuvoston direktiivin 93/42/ETY:n mukainen lääkinällinen laite.

## **BIPACKSEDEL A-VITA® HYDRA+**

### **Nässpray**

**med korsbunden hyaluronsyra, dexpanthenol, biotin samt vitaminerna A och E**

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda preparatet**

#### **1. Vad A-Vita® Hydra+ är och vad det används för**

A-Vita® Hydra+ nässpray är en CE-märkt medicinteknisk som är avsedd för att smörja och fukta nässlemhinnan, hålla den smidig samt understödja återuppbyggnaden av nytt epitel. Den korsbundna hyaluronsyran (0,1 %) och dexpanthenolen (1 %) återfuktar samt ökar viskoelasticiteten (smidigheten) hos nässlemhinnan. Biotinet samt vitaminerna A och E främjar slemhinnans normala ämnesomsättning.

#### **A-Vita® Hydra+ är avsett:**

- att användas då nässlemhinnan är uttorkad och/eller atrofierad, särskilt i fall där detta beror på vissa miljöfaktorer eller behandlingar (såsom damm, irriterande substanser, öppnande nässprayer, syrgasbehandling)
- som stödbehandling vid olika sjukdomar i näsa och bihålor (rinosinuit, allergisk snuva, läkemedelsutlöst snuva, kronisk atrofisk rinit o.dyl.)
- att användas för att understödja slemhinnefunktionernas återhämtning efter kirurgiska ingrepp i näsa eller bihålor.

#### **2. Vad du behöver veta innan du använder A-Vita® Hydra+**

Använd inte A-Vita® Hydra+ om du är överkänslig mot något av innehållsämnen i preparatet (anges i avsnitt 6).

#### **3. Hur du använder A-Vita® Hydra+**

- Ta av det sigillförsedda locket på flaskan. Placera ena tummen mot botten på flaskan och pek- samt långfingret på pumpdelens vingar. Tryck snabbt ned vingarna så långt det går, och släpp dem sedan. Upprepa tills den första dosen spray frigörs från flaskan. Böj därefter huvudet litet framåt och andas långsamt ut. Täpp till ena näsborren med ett finger och spraya in en dos i den öppna näsborren medan du samtidigt andas in.
- Rekommenderad dos är två spraypumpningar i vardera näsborren två gånger dagligen, eller enligt läkarordination.

#### **4. Varningar**

- Sluta använda produkten och kontakta läkare om du märker några biverkningar.
- Svälj inte produkten.
- Undvik att få produkten i ögonen.
- Använd inte produkten om förpackningen eller flaskan är trasig.
- Använd inte produkten efter det utgångsdatum som anges på förpackningen. Detta datum gäller en hel (intakt) förpackning som förvarats på korrekt sätt.

#### **5. Hur A-Vita® Hydra+ ska förvaras**

- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Stäng flaskan ordentligt efter användning.
- Förvara nässprayen vid rumstemperatur.

#### **6. Övriga upplysningar**

##### **Innehållsämnen:**

Dexpanthenol, E-vitaminacetat, A-vitaminpalmitat, biotin, hydrogenerad ricinolja 40 eterisk olja, korsbunden hyaluronsyra, natriumsalt av etylendiamintetraättiksyra (EDTA), natrium-N-(hydroximetyl)glycinat, kaliumsorbat, naturliga aromämnen, isoton buffertlösning pH 7,2.

**Förpackning:**

20 ml flaska

**Tillverkare:**

D.M.G. Italia srl, Via Laurentina, km 26,700, 00040 Pomezia (RM), Italien

**Marknadsförs av:**

Takeda Oy, PB 1406, 00101 Helsingfors

A-Vita® Hydra+ nässpray är en medicinteknisk produkt i enlighet med Rådets direktiv 93/42/EEG